

## **SK ČISTENIE MANŽETY**

Nečistoty z manžety odstráňte kúskom textílie navlhčenej v mydlovej vode.

### **MOŽNOSŤ PRANIA MANŽETY**

Manžety tlakomerov Microlife je možné ručne prať. **Otvor na okraji návleku manžety slúži na vybratie vzduchového vaku pred praním návleku.**

#### **Postup:**

1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrne vyberte vzduchový vak.
3. Návlek manžety je možné ručne prať vo vode s teplotou max. 30 °C.

#### **Vzduchový vak NIKDY neperte!**

Návlek manžety nechajte dôkladne vysušiť.

4. Do opraného návleku opatrne vložte späť vzduchový vak. Hadičku prevlečte cez otvor pre hadičku zvnútra manžety von.
5. Vzduchový vak musí byť v manžete dokonale vystretý. Môžete si pomôcť vhodným tupým predmetom.
6. Znova pripojte konektor manžety.

#### **⚠ Upozornenia:**

- Vzduchový vak musí byť v návleku manžety vyrovnaný, nie preložený alebo pokrčený.
- Na pranie nepoužívajte zmäkčovadlá tkanín.
- Vždy pred praním vyberte vzduchový vak z manžety.
- Po vypraní návleku vložte vzduchový vak naspäť do návleku.
- **NIKDY neperte vnútorný vzduchový vak!**
- **Manžetu ani samotný návlek manžety neperte v práčke alebo umývačke riadu!**

#### **Záruka**

Manžeta má funkčnú záruku na tesnosť vzduchového vaku **2 roky**. Záruka sa nevzťahuje na snímateľný návlek a opotrebovanie manžety spôsobené bežným používaním podľa návodu.

## **CZ ČIŠTĚNÍ MANŽETY**

Nečistoty z manžety odstráňte kouskem textílie navlhčená v mýdlové vodě.

### **MOŽNOST PRANÍ MANŽETY**

Manžety tlakoměrů Microlife je možné práť ručně. **Otvor na kraji návleku manžety slouží k vyjmutí vzduchového vaku před praním návleku.**

#### **Postup:**

1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrně vyjměte vzduchový vak.
3. Návlek manžety lze práť ručně ve vodě s teplotou max. 30 °C.

#### **Vzduchový vak NIKDY neperte!**

Návlek manžety nechte po oprání důkladně vysušiť.

4. Do vypraného návleku opatrně vložte zpět vzduchový vak. Hadičku protáhněte otvorem pro hadičku zevnitř manžety ven.
5. Vzduchový vak musí být v manžetě dokonale narovnaný. Můžete si pomoci vhodným tupým předmětem.
6. Znovu připojte konektor manžety.


#### **⚠ Upozornění:**

- Vzduchový vak musí být v návleku manžety vyrovnaný, ne přeložený nebo pomačkaný.
- Na praní nepoužívejte změkčovadla tkanin.
- Vždy před praním vyjměte vzduchový vak z manžety.
- Po vyprání a dokonalém vysušení návleku vložte vzduchový vak zpět do návleku.
- **NIKDY neperte vnitřní vzduchový vak!**
- **Manžetu ani samotný návlek manžety neperte v pračce nebo myčce nádobí!**

#### **Záruka**

Manžeta má funkční záruku na těsnost vzduchového vaku **2 roky**. Záruka se nevzťahuje na snímateľný návlek a/nebo opotrebení manžety způsobené běžným používaním dle návodu.

## Otvor na okraji manžety

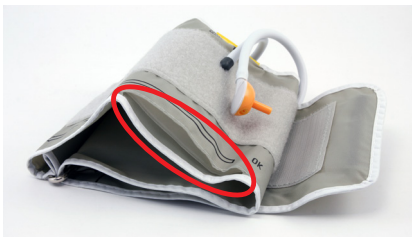

## Postup:

